

Käyttöohje: Revamil haavasidos

Tuote

Revamil Wound Dressing
5x5/8x8/10x20 cm hunajalla kyllästetty harsosidos haavanhoitoon

Tuotekuvaus

Revamil Wound Dressing on haavasidos, joka on kyllästetty valvotuissa olosuhteissa tuotetulla puhtaalla hunajalla. Valvottu tuotantoprosessi takaa, ettei Revamil Wound Dressing sisällä jäämiä torjunta-aineista ja että Revamil Wound Dressingin laatu pysyy tuotannossa tasaisena.

Revamil Wound Dressingissä käytetty hunaja sisältää runsaasti hunajaentsyymejä, mm. glukoosioksidaasia. Revamil-haavasidosta tulee käyttää yhdessä puoliokklusiivisen peittosidoksen kanssa, jotta haavaympäristö pysyy kosteana. Peittosidos kiinnitetään normaaliin tapaan. Korkean sokeripitoisuuden ansiosta osa haavanesteestä sekoittuu Revamiliin kanssa ja muodostaa kerroksen, joka vahvistaa haavasidoksen antibakteerista suojaa.

Käyttö

1. Puhdista haava tavalliseen tapaan, jos tarpeen.
2. Avaa pakkaus yläreunasta vetämällä sinetti auki, ja poista sitten suojakalvo haavasidoksen päältä.
3. Ota haavasidos pakkauksesta ja levitä se haavan päälle.
4. Kiinnitä haavasidos tavalliseen tapaan, esimerkiksi itseliimautuvalla huokoisella haavateipillä.
5. Sidos voidaan peittää myös peittosidoksella, joka kiinnitetään tavalliseen tapaan.
6. Irrota haavasidos varovasti enintään 3 päivän kuluttua ja vaihda se uuteen Revamil Wound Dressing -sidokseen.

Käyttöaiheet

Revamil Wound Dressingiä voidaan käyttää erityyppisissä haavoissa, kuten makuuhaavat, erilaiset haavaumat, tulehtuneet haavat, akuutit haavat, kirurgiset ja sädehoidosta johtuvat syöpähaavat sekä pienet (1. ja 2. asteen) palovammat.

Vasta-aiheet

- Ei saa käyttää potilaille, joiden tiedetään olevan yliherkkiä hunajalle.
- Jos Revamil Wound Dressingin käytön jälkeen havaitaan odottamattomia (tässä mainitsemattomia) sivuvaikutuksia, ota yhteys lääkäriin ja tuotteen valmistajaan.

Käyttöön liittyvät varoimet

- Ei saa käyttää, jos pakkaus on vahingoittunut.
- Ei saa käyttää, jos pakkaus ei ole ollut tiiviisti suljettu.
- Samaa haavaa voi käsitellä tällä tuotteella keskeytyksettä korkeintaan 30 päivän ajan.
- Älä käytä käytettyä sidosta uudelleen.
- Älä steriloï avattua pakkausta uudelleen.
- Jos sidosta käytetään uudelleen, hunajan teho saattaa heiketä, tuote kontaminoitua sekä haava kontaminoitua tai tulehtua.

Säilytys

Säilytyslämpötila 10–30 °C

Valmistaja

Markkinoija